

BIORHIN VOUS INFORME

Note d'information **n°4**

Pfastatt, le 25/06/13

Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs,

Comme nous le faisons régulièrement, nous vous adressons un court bulletin d'information destiné à vous faire part des évolutions mises en place au sein des six sites de BIORHIN.

Canicule

En ce début d'été et de fortes chaleurs potentielles, le maintien des échantillons sanguins à une température adéquate devient critique. Les mallettes (du moins celles fournies par nos labos) sont isothermes, mais nous vous suggérons d'accompagner les prélèvements d'un ou plusieurs « blocs froids » réfrigérés au préalable mais surtout pas congelés. Ils sont disponibles au laboratoire à la demande.

Conditions préanalytiques

Un certain nombre de paramètres comme les sérologies infectieuses, la Transferrine ou les Anticorps anti-thyropéroxydase (TPO) voient leur délai préanalytique considérablement raccourci par rapport aux précédentes indications du Référentiel externe de prélèvement. Cet élément n'aura que peu d'incidence sur votre pratique quotidienne dans la mesure où le délai reste confortable : il est de 8H avant traitement pour l'ensemble des paramètres figurant dans le tableau ci-après.

Code	Nom	Nature	Tube à prélever	T° de transport	Stabilité échantillon avant traitement
ACHAV	Hépatite A IgG ou totaux	Sang	SEC-Gel jaune (1 mL)	18/28°C	8h à 18/28°C
ACHBC	Ac anti-HBc totaux	Sang	SEC-Gel jaune (1 mL)	18/28°C	8h à 18/28°C
ACHBS	Ac anti-HBs	Sang	SEC-Gel jaune (1 mL)	18/28°C	8h à 18/28°C
ASLO	Anticorps anti-streptolysine (ASLO)	Sang	SEC-Gel jaune (1 mL)	18/28°C	8h à 18/28°C
BW1	Sérologie tréponématose (syphilis)	Sang	SEC-Gel jaune (1 mL)	18/28°C	8h à 18/28°C
CMV1	sérologie CMV	Sang	SEC-Gel jaune (1 mL)	18/28°C	8h à 18/28°C
EBV	Sérologie EBV	Sang	SEC-Gel jaune (1 mL)	18/28°C	8h à 18/28°C
HAVM	Hépatite A IgM	Sang	SEC-Gel jaune (1 mL)	18/28°C	8h à 18/28°C
HBCM	Ac anti-HBc IgM	Sang	SEC-Gel jaune (1 mL)	18/28°C	8h à 18/28°C
HELI	Sérologie Helicobacter pylori	Sang	SEC-Gel jaune (1 mL)	18/28°C	8h à 18/28°C
HEPC1	Sérologie Hépatite C	Sang	SEC-Gel jaune (1 mL)	18/28°C	8h à 18/28°C
HIV	Sérologie HIV-1 et HIV-2	Sang	SEC-Gel jaune (1 mL)	18/28°C	8h à 18/28°C
LYME1	Sérologie de la maladie de Lyme	Sang	SEC-Gel jaune (1 mL)	18/28°C	8h à 18/28°C
RUB1	Sérologie rubéole	Sang	SEC-Gel jaune (1 mL)	18/28°C	8h à 18/28°C
TGA	Ac anti-thyroglobuline	Sang	SEC-Gel jaune (1 mL)	18/28°C	8h à 18/28°C
TOXO	Sérologie toxoplasmose	Sang	SEC-Gel jaune (1 mL)	18/28°C	8h à 18/28°C
TPO	Ac anti-thyroperoxydase	Sang	SEC-Gel jaune (1 mL)	18/28°C	8h à 18/28°C
TRANS	Transferrine	Sang	SEC-Gel jaune (1 mL)	18/28°C	8h à 18/28°C
WBLG	Western Blot Lyme	Sang	SEC-Gel jaune (1 mL)	18/28°C	8h à 18/28°C

Référentiel de prélèvement

Un nouvel exemplaire réactualisé est en cours de préparation et vous sera remis à la rentrée.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prions d'agréer nos salutations confraternelles.

Hélène BECKER, Nicolas BERNHARD, Véronique BIHL, Martine CHABOT,
Philippe CHABOT, Marie-Christine CHASTIN, Isabelle HOUILLON, Valérie LANTZ